

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁZEV: VAKUOVÁ PUMPA NOŽNÍ, VELKÁ

TYP: EM-20/C

VÝROBCE:



EGO Zlín, spol. s r. o.

U Pekárny 438
763 14 Zlín – Štípa
Česká republika

IČO: 46902473

tel: +420 577 100 031

www.egozlin.cz



VAKUOVÁ PUMPA JE NEZBYTNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM VAKUOVÝCH PROSTŘEDKŮ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry: délka válce 35,5 cm, průměr válce 11 cm, šířka pumpy včetně nožní základny 22,5 cm

Hmotnost: 790 g

Kapacita: 2 l

Materiál: plast

ÚČEL POUŽITÍ:


Vakuová pumpa nožní, velká slouží k odsátí vzduchu z vakuového prostředí fy. EGO Zlín (dále jen „VP“) za účelem jeho vytvrzení. Vzduch se odsává přes vakuový ventil zabudovaný ve VP.

POKYNY PRO POUŽITÍ s vakuovým prostředkem EGO Zlín:

Odsátí vzduchu z VP

Hadice je zapojena na výstupu pumpy s označením „DEFLATE“.

1. utáhněte pevně šroubení ventilu VP po směru hodinových ručiček

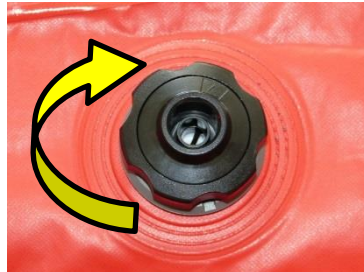

2. vsuňte konec hadičky vakuové pumpy do otvoru utáhnutého vakuového ventilu



3. pumpu fixujte sešlápnutím a proveďte odsávání vzduchu z VP pomocí táhla pumpy až do jeho úplného vytvrzení
4. vyjměte konec hadičky z otvoru ventilu

Pro zrušení vakua uvnitř VP uvolněte horní díl vakuového ventilu otočením proti směru hodinových ručiček.



SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v čistých a suchých skladovacích prostorách.

POKYNY PRO LIKVIDACI:

Výrobek určený k likvidaci musí být předán oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu.

Vždy dodržujte předpisy dané země pro nakládání s odpady.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na běžné fyzické opotřebení, na vady způsobené nesprávným zacházením uživatele a na mechanické poškození.

EGO Zlín, spol. s r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek musí být dodán k opravě čistý a dekontaminovaný!

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku!

Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný.

V PŘÍPADĚ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY PROSÍM KONTAKTUJTE VAŠEHO DODAVATELE.